

「グローポレーション」

を使ってお手入れ♪

部位の名称と機能



お手入れ手順 (約5~10分)

STEP

1. 頭皮を清潔な状態にする

洗髪後など、頭皮の汚れを落とした状態で使用します。

STEP

2. EMSによるトリートメント

タオルドライし、頭皮に少し水分が残った状態で全体または気になる部分をトリートメントします。

頭皮の筋肉に働きかけ、マッサージと同様の血行促進が期待されると同時に育毛エッセンスが浸透しやすい土台をつくります。

STEP

3. 育毛エッセンスを塗布する

育毛エッセンスを気になる部分に塗布し、指の腹で頭皮全体をマッサージするようになじませます。

STEP

4. EPによるトリートメント

育毛エッセンスの有用成分の浸透を助けるために行います。


EMSと同様に、頭頂部からスタートし頭皮全体をトリートメントします。

機器のヘッドが頭皮に垂直にあたるようにするのがポイントです。

STEP

5. 手早く乾かす

トリートメントの手順

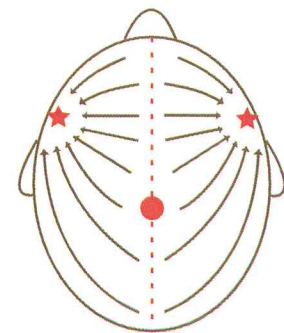

正中線にそって
左右それぞれ側頭筋にむかって
トリートメントを行います。
機器のヘッド部が頭皮に垂直に
当たるようにします。

山野愛子どろんこ美容。

yamano